

バルブ一体型酸素流量調整器

グッドラン®



大陽日酸
The Gas Professionals

もっと使いやすく、
より安全に、
さらに安心を。

すべては患者さんのために





流量ツマミ・残量計・ボンベ元栓を“すべて上向き”^{※1}にすることで、ラクな姿勢で操作できます。
さらに、業界初^{※2}の“光る文字盤”の採用により、夜間や不意の停電時でも、劇場・映画館などの暗い場所でも、設定状態が確認できます。

※1:特許出願中 ※2:2006年4月現在



ラクラク操作・確認できる流量ツマミ

- 透明感と清潔感のある流量ツマミで、カチッとすばやく設定できます。
- 数値が大きく、暗い場所では文字盤が光ります。(残量計含む)



見やすい残量計

- 黒い指針でボンベの酸素残量が分かります。
- 上向き表示なので、かがまなくても確認できます。



360°回転するタケノコ型のホースグチ

- 回転するので、酸素チューブ(カニューラ)のよじれを防ぎます。
- 酸素チューブ(カニューラ)を直接取り付けられます。
- 専用コネクター(オプション)で呼吸同調器を簡単に取り付けられます。



安心と安全を考慮したボンベ元栓

- 上から緑色の●マークが見えれば、“開”状態となり、使用できます。
- 強い衝撃などで万一酸素が漏れた時には、“閉”にすることで酸素の流出を防ぎます。




従来品^{*}と比べ約20~30%軽量化

※ヨーク式バルブ+圧力計+ヨーク対応調整器


「在宅呼吸ケア白書」(日本呼吸器学会、2005年)の統計より

在宅酸素療法を始めてからの不安や不満

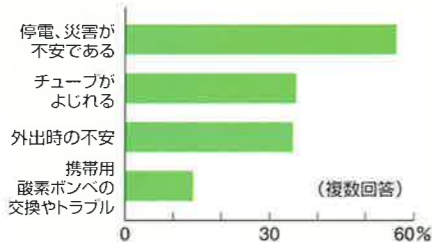

- 携帯用酸素ボンベに関する項目が上位を占めている。
- 停電時や災害時の不安の訴えが最も多かった。

機器の評価

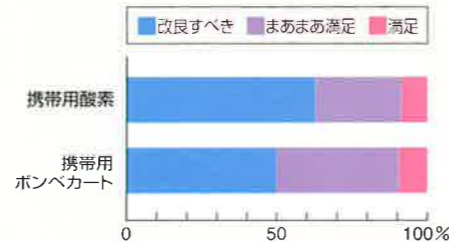

- 携帯用酸素の「改良すべき点」上位5項目は、①「携帯性・重さ」(69%)②「小型化」(56%)③「持続時間」(46%)④「交換時の調整器の取っ外し」(14%)⑤「酸素節約装置」(10%)が挙げられた。(複数回答)
- 携帯用ボンベカートの「改良すべき点」上位3項目は、①「持ち運びやすさ」(58%)②「重さ」(56%)③「操作性」(15%)が挙げられた。(複数回答)

*「在宅呼吸ケア白書」を参照。詳細な数値・表現等、一部省略・変更してあります。

多くの患者さんのご要望に応じて、バルブと調整器を一体化し、小型・軽量化を実現。使いやすさと安全性をさらに高めました。



バルブと調整器を一体化

患者さんによる、調整器の取り付け・取り外しが一切不要です。

取り付けミスによる酸素漏れを解消

パッキンの磨耗・脱落による酸素漏れを解消



調整器
バルブ

■酸素流量調整器部仕様

品名	グッドラン	
型式	20MPa	15MPa
識別カラー(流量ツマミ銘板色)	ピンク	ブルー
製造販売届出番号	13B2X00193000001	
一般的名称/分類	高圧ガスレギュレータ/一般医療機器	
特定保守管理医療機器	該当	
使用ガス	酸素ガス	
入口圧力	3.0~19.6MPa	3.0~14.7MPa
出口圧力	0.15MPa	
流量範囲	0~6L/分	
流量目盛	0/0.25/0.5/0.75/1/1.5/2/2.5/3/4/5/6 L/分	

■ガス供給バルブ部仕様

型式	NB-2	
耐圧試験圧力	32.7MPa	24.5MPa
最高使用圧力	19.6MPa	14.7MPa
安全弁作動圧力	22.3~26.1MPa	16.7~19.6MPa
ガス充填口/脚ネジ	酸素ヨークピン式(逆止弁付き)/脚ネジ:3/4-16UNF	

■全重量・寸法

重量	約550g(酸素流量調整器、ガス供給バルブ、残量計、ホースグチユニット)	
寸法	高さ88mm(ポンベ取付時、脚ネジ部より上) 流量ツマミφ46mm	

関連製品

■キャリーバッグ

ショルダーベルト/リュックベルト付きで、カートやキャリーから外して持ち運び自由。ポンベの状態をクリア窓から確認できる安心設計。



- サイズ:S-M(1.1L~2.0L)/M-L(2.0L~2.8L)
- カラー:ブラック/ベージュ

■4輪キャリー

酸素ポンベを搭載できるシルバーカー。



※日常生活用具
助成対象品

■2輪カート

4段階でハンドルの高さを調節できる酸素ポンベ専用カート。



販売代理店向け



専用充填ガット

- ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 当カタログに記載の仕様は、性能向上のため予告なく変更することがあります。

製造販売元

大陽日酸株式会社

バイオ・メディカル事業部 ホームケア営業部

本社 東京都品川区小山1-3-26 東洋Bldg. 〒142-8558
TEL 03(5788)8340 FAX 03(5788)8710

<http://www.tn-sanso.co.jp>

北海道支店 TEL.011(737)5752
東北支社 TEL.022(365)0928
北関東支社 TEL.048(646)0061
関東支社 TEL.044(549)9300

中部支社 TEL.052(629)0601
関西支社 TEL.06(6449)7080
中四国支社 TEL.082(241)8691
九州支社 TEL.092(482)0681

お問い合わせは

■製造元 株式会社 ネリキ